

## スライドカンファレンスバーチャルスライド参照方法のご案内

スライドカンファレンスの細胞像をバーチャルスライドでご覧いただけます。  
参照方法を説明します。


### 1. 参照方法

1) ブラウザは、Edge, GoogleChrome, Firefox, Safari いずれも対応可能です。Windows でも MAC でも閲覧できます。また iPhone や iPad などのスマホでも閲覧可能です。



2) 下記 URL にアクセスするとログイン画面が開きます。


Olympus Net Image Server の URL <http://133.41.103.67/Account/Login>

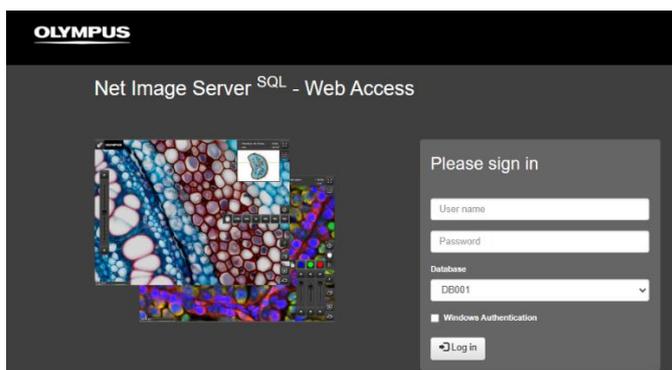

3) 下記に従ってログイン画面に Email アドレスとパスワードを入力、Database BD001 を選択し「Log in」をクリックします。

(注意)

指定した User name と Password を  
入力して下さい。

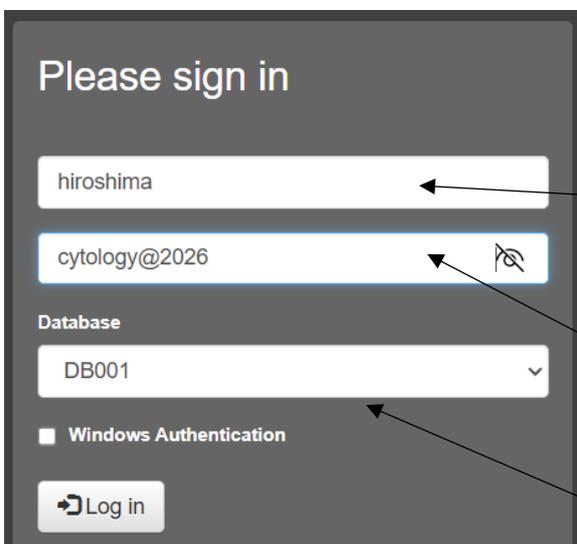

Please sign in

hiroshima

cytology@2026

Database  
DB001

Windows Authentication

Log in

User name  
hiroshima

Password  
cytology@2026

Database  
DB001 を選択

4) ログインすると下記の画像が表示されます。




赤枠にあるフォルダをクリック

5) 症例を選択します。



6) バーチャルスライドが開きます。

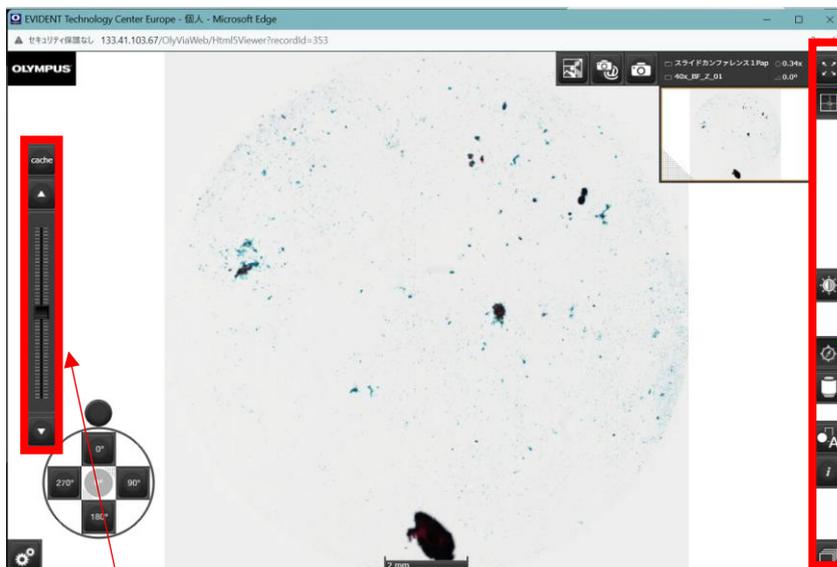

Z-Stack フォーカス調整が可能です。(症例1のみ)



## 各種機能の説明



画像の全画面表示の切り替えができます。  
戻る際は、Escキーか、画面内をダブルクリックしてください。



画像の明るさ調整ができます。



画像回転ボタンの表示ON/OFFができます。



画像の倍率変更ができます。マウスのスクロール機能でも拡大縮小が可能です。



画像情報を表示します。



複数のレイヤ画像がある場合は、ここで切り替えます。



画像の回転をすることができます。

### 【回答フォーム】

回答は下記 URL の回答フォームに入力をお願いします。

#### 症例 1 腹水細胞診の 1 例

<https://forms.office.com/r/bXNRZP3k90>



#### 症例 2 椎骨細胞診の 1 例

<https://forms.office.com/r/XTcu3HAErB>



多数のご意見ををお願いします。